



gebruiksaanwijzing

# Steunrol Maxi

## Indicatie

Ondersteunen en beschermen van hoofd, romp, armen, knieën en benen.

## Toepassing

Het aanbrengen van de FlexiOr® STEUNROL MAXI als nek- en rompondersteuning gebeurt op basis van de volgende drie stappen.

### Stap 1 (optioneel):

Plaats een 'standaard' hoofdkussen verticaal onder de nek van de cliënt vanaf lumbaal.

### Stap 2:

Positioneer de ligorthese langs het lichaam en onder de nek van de cliënt en (eventueel) bovenop het hoofdkussen.

### Stap 3:


Masseer de zijkanten van het kussen langs het lichaam en (eventueel) tussen de benen, zodat nek, romp en ledematen optimaal worden ondersteund.

## Attentie

- Rugligging wordt bij het aanbrengen van de steunrollen als uitgangspositie aangenomen.
- Er wordt geadviseerd om altijd 30-45° wisselligging toe te passen. Het kussen voegt zich naar de houding van de cliënt.



*hoofdkussen optioneel*

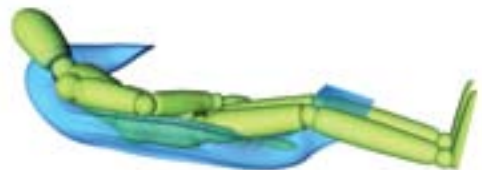



gebruiksaanwijzing

# Antispitsvoetrol

## Indicatie

Tegengaan van spitsvoeten, onderuitzakken en decubitus aan hielen.

## Toepassing

Het aanbrengen van de FlexiOr® ANTISPITSVOETROL gebeurt op basis van de volgende drie stappen.

### Stap 1:

Breng het kussen vanaf het voeteneind achter de voeten aan.

### Stap 2:

Positioneer de benen van de cliënt met minimale druk tegen de orthese.


### Stap 3:

Zorg ervoor dat het kussen niet achter de voeten vandaan kan rollen.

*\* Situatieschets: cliënt ligt in rugligging (of halfzittende houding), ligorthese horizontaal, het brede gedeelte wijst richting cliënt.*

## Attentie

- Rugligging wordt bij het aanbrengen van de steunrollen als uitgangspositie aangenomen.
- Er wordt geadviseerd om altijd 30-45° wisselligging toe te passen. Aangezien het kussen zich voegt naar de houding van de cliënt hoeft de orthese hierbij niet verwijderd te worden.

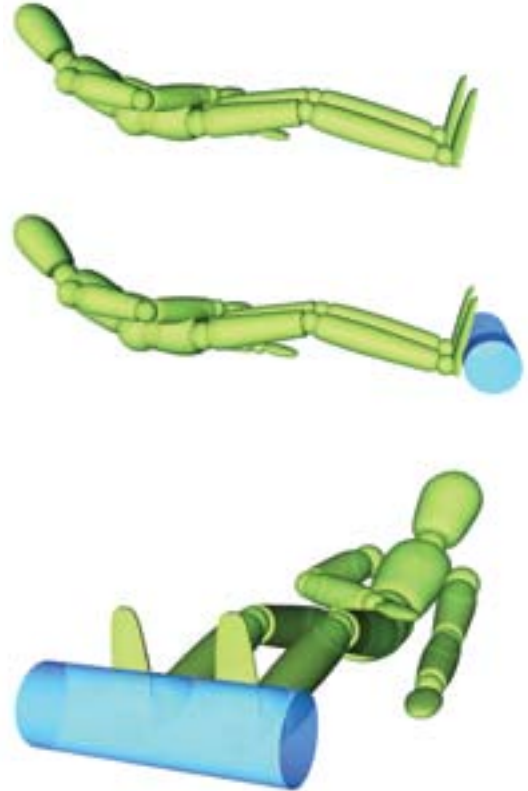

PAS ALTIJD 30-45° WISELLIGGING TOE  
VOORKOM ORALE EN NASALE INNAME VAN VULLING  
VOORKOM ONGECONTROLEERD DOORDRAAIEN TOT BUIKLIIGGING